

FLOWTENS

LEAD THE FLOW

Neurostimulation Tibiale Postérieure Transcutanée

Traitement des symptômes de l'hyperactivité vésicale
(Urgenturie, incontinence par impériosité, Pollakiurie et Nycturie)



Personnalisable
& Programmable



Digitale
& connectée



Simple
& Ergonomique




DISPONIBLE SUR
Google Play



Télécharger dans
l'App Store

Caractéristiques techniques

Intensité des pulsations (0 à 50 mA)

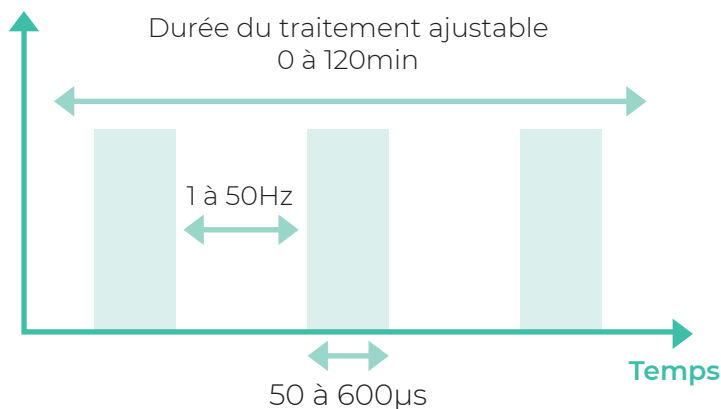

Programmes disponibles



Programme 1

20 min 10 Hz 200 µs



Programme 2

20 min 14 Hz 210 µs



Programme 3

20 min 20 Hz 200 µs



Programme 4

20 min 25 Hz 210 µs



Programme 5

20 min 5 Hz 210 µs



Programme libre

20 min 50 Hz 210 µs

(code d'accès : 1234)

Courant de sortie (ajustable) :
0 à 50mA* (+/-5% de la valeur max)
* Sur résistance 1000 Ohm (+/-10%)

Largeur d'impulsion (ajustable) :
50 à 600µs (+/-10%)

Fréquence d'impulsion (ajustable) :
1 à 50Hz (+/-10%)

Durée du programme (ajustable) :
1 à 120min

Consommation en fonctionnement :
< 0.1W

Alimentation :
Batterie rechargeable
Lithium-ion Polymer 3.7V

Caractéristiques RF :

- Bluetooth® LE : 2400-2483.5 MHz (ISM)
- Modulation : GFSK
- Puissance émission : -4.7 dBm
- Espacement et nombre de canaux : 1 MHz, 40 canaux
- Type d'antenne : Céramique gain 0.5 dBi

Dimensions :
60 mm x 44 mm x 18 mm

Masse :
30g

Dimension électrode recommandée :
Réf.SAE-SC040000WP-VT
ø 40 mm

Composition du textile chevillière :
46% Polyamide / 42% Polyester /
12% Elasthane




Références

Service client :

· Pour passer commande : order@flowtens.com

· Pour toute question ou réclamation : contact@flowtens.com

Tél : 09 78 45 27 74

	Dénomination	Réf	GTIN	Code LPP
	Kit complet droit	FT01-R	3770025687001	<p>Code 1111701 - LOCATION HEBDOMADAIRE - Base de remboursement = 11,74€ TTC par semaine dans la limite de 26 semaines.</p> <p>Code 6163358 - ACHAT d'un dispositif Flowtens - Base de remboursement = 304,90€ TTC</p>
	Kit complet gauche	FT01-L	3770025687018	<p>Code 1111701 - LOCATION HEBDOMADAIRE - Base de remboursement = 11,74€ TTC par semaine dans la limite de 26 semaines.</p> <p>Code 6163358 - ACHAT d'un dispositif Flowtens - Base de remboursement = 304,90€ TTC</p>
	Stimulateur	FLO-02-201	3770025687049	<p>Code 1111701 - LOCATION HEBDOMADAIRE - Base de remboursement = 11,74€ TTC par semaine dans la limite de 26 semaines.</p> <p>Code 6163358 - ACHAT d'un dispositif Flowtens - Base de remboursement = 304,90€ TTC</p>
	Chevillère droite	FLO-02-108-R	3770025687025	-
	Chevillère gauche	FLO-02-108-L	3770025687032	-
	Electrodes auto-adhérentes Flowtens	SAE-SC040000 WP-VT	 <p>(01)04719872332183 (11)YYMMDD (10)YYYYWW</p>	<p>Code 6154951 La prise en charge est assurée dans la limite d'un lot maximum tous les 15 jours Base de remboursement : 5,18€ TTC</p>

Mise en place de la cheville



1 Clippez le stimulateur sur la face extérieure




2 Clippez les électrodes à l'intérieur puis retirez le film de protection



3 Positionnez sur la cheville
Vérifiez le logo :
L = Cheville pied gauche
R = Cheville pied droit
Utiliser sur peau sèche



4 Ajustez la cheville selon votre confort en prenant soin de bien positionner le marqueur de la malléole interne

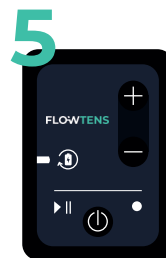

5 Lancez la stimulation (prog 1) :
· ON/OFF : Appui de 2sec pour allumer et éteindre
· Réglez l'intensité de stimulation avec +/-

Utilisation du smartphone



- Allumez le stimulateur.
- Activez le Bluetooth de votre téléphone.
- Lancez l'application, créez votre compte et laissez vous guider.



Déconnecté



Connecté



Séances de stimulation

Activez votre cheville FlowTens

Lancer une séance d'électro stimulation et choisir un des six programmes disponible



Mes évolutions

Bilan de ma thérapie

Suivi d'observance et partage des données d'usage



Programmer

Planifier une séance

Programmer jusqu'à 3 séances à l'avance sur 12h



Ma cheville

Voir les informations de ma cheville

Consulter le niveau de batterie et contrôler l'appairage avec la cheville



Notifications

Paramétrez vos notifications

Gérer les notifications



Mon Compte

Gérez votre compte et vos médecins

Gérer les données personnelles



Service client :

- Pour passer commande : order@flowtens.com
- Pour toute question ou réclamation : contact@flowtens.com
- Tél : 09 78 45 27 74

www.flowtens.com

Conçu, fabriqué et distribué par FlowStim Technology, France
Pôle Economique
1010 Av de l'Europe 33260 La Teste de Buch

FlowStim TECHNOLOGY